

類別:機械器具73補聴器 管理医療機器  
JMDNコード:30082000 一般的名称:ポケット型補聴器  
販売名:ポッケ sel1

### 【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。

【補聴器や電池は飲み込むと危険である。】

大きな音で聞き続けけないこと。

【大きな音で聞き続けると、更に聞こえを悪くすることがある。また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。】


他人に補聴器を貸さないこと。

【他人の耳を傷めることがある。】

かゆみやかぶれに注意すること。

【体質によって、かゆみやかぶれを生じる場合がある。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談すること。】

### 【形状・構造及び原理等】

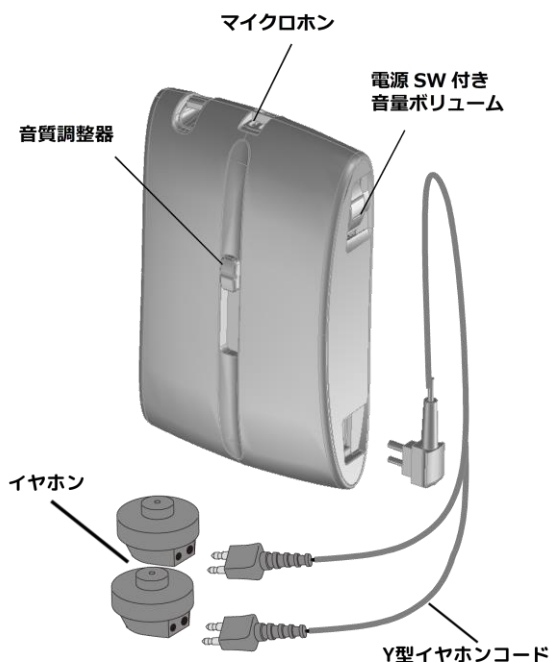

寸法: W50×H80×D20mm

質量: 約 69g(電池、イヤホン、コード、耳せん含む)

材質: 本体 PC/ABS 樹脂

使用電池: 単 4 アルカリ 乾電池 LR03 1.5V 1個

原理: 音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより  
聴力を補う

90dB最大出力音圧レベル(ピーク値): 118dB +3dB 以下

最大音響利得(HFA): 44dB ±5dB

電撃保護: 内部電源機器 B 形装着部

### 【使用目的又は効果】

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。

### 【使用方法等】

- (1) 電池を入れる。
- (2) MT切換スイッチをMにする。
- (3) イヤホンコードを補聴器に取付ける。
- (4) イヤホンの耳せん部分を耳あなに入れる。
- (5) 電源を入れる。
- (6) 音量を調整する。
- (7) 音質を調整する。
- (8) 使用を終了する場合は、電源を切り補聴器の耳せん部分を耳あなからははずす。

### 【使用上の注意】

- ・次の場合は補聴器の使用を中止すること。  
耳漏、耳垢、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、痒み、湿疹が認められるとき。
- ・取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。
- ・MRI(磁気共鳴画像診断装置)の診断を受けるときや、マイクロ波治療器などの電磁波を利用した装置を使用して治療する場合は補聴器を外すこと。
- ・大きな音で聞き続けると耳を傷めることがある。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、室温で保存すること。

保管環境: -10~50℃ 30~90%RH 50k~106kPa

電池寿命: 約 170 時間

電池寿命は、電池の種類または使用条件によって異なる場合がある。

### 【保守・点検に係わる事項】

補聴器本体やイヤホン等は、柔らかい布等を使用してお手入れをしてください。詳細は、付属の「取扱説明書」を参照してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

製造販売業者

株式会社三和製作所 TEL: 0120-331-756

製造業者

株式会社三和製作所 メディケアカンパニー ミミー電子事業部

お問い合わせ先(発売元)

アイシヘルスケア株式会社

TEL: 06-7507-1041 FAX: 06-7501-8656

取扱説明書を必ず参照してください。